

Instrukcja używania maseczki KN95

Należy zachować pewne środki ostrożności, aby zapewnić najwyższą możliwą skuteczność maseczki ochronnej:

1. Ostrożnie nałóż maseczkę na twarz, tak, aby zakryła usta i nos, jednocześnie minimalizując przestrzeń między maską a twarzą.
2. Nie dotykaj maseczki po jej założeniu.
3. Zdejmij maskę zgodnie z zalecaną instrukcją, tj. nie dotykaj jej z przodu tylko zdejmij ją za gumki.
4. Po zdjęciu maseczki (lub za każdym razem, gdy przypadkowo dotkniesz jej podczas noszenia), należy dokładnie umyć ręce mydłem lub użyć środka dezynfekującego o odpowiedniej do dezynfekcji zawartości alkoholu.
5. Zaleca się wymianę maseczki co 1-2 dni, w zależności od potrzeby.
6. Wymień maseczkę na nową, jeśli wydaje się wilgotna, jest zniszczona lub utrudnia wyraźnie utrudnia oddychanie.
7. Wyrzuc zużyłą maskę od razu po jej zdjęciu.

Producent: FANG RUI (JIASHAN) LABOR INSURANCE SUPPLIES CO., LTD.
No.79, Zhijang Road, Jiashan, Zhejiang, China

Importer: SORIMEX sp. z o.o. (dawniej SORIMEX sp. z o.o. sp. k.),
ul. Równinna 25, 87-100 Toruń, Poland
tel.: +48 56 657 77 20, fax: +48 56 657 77 21
e-mail: biuro@sorimex.pl www.sorimex.eu